



LP — 20

HYGIENE

AUSTRIA

# Atemschutzmaske, FFP2

1. Made in Austria
2. Eigen- und Fremdschutz
3. Guter Tragekomfort
4. Hohe Atmungsaktivität aufgrund hochwertiger Vliesmaterialien



1. Reinigen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser oder Desinfektionsmittel.



2. Legen Sie um jedes Ohr eine Schlaufe der Maske.



3. Ziehen Sie das obere und untere Ende über Nase und Kinn, damit zwischen dem Gesicht und der Maske keine Lücken entstehen.



4. Drücken Sie den Nasenbügel fest an Nase und Wangen.



5. Vermeiden Sie das Berühren der Maske während Sie sie tragen.



6. Nach der Verwendung bitte entsorgen.

# Spezifikationen Maske

Marke	- Hygiene Austria LP GmbH
Name	- Atemschutzmaske, FFP2
Type	- PSA-Kategorie III
Geräteklasse	- FFP2
Menge / Verpackungseinheit	- Einzeln, 3 Stk. 20 Stk.
Farbe	- Weiß
Gebrauchshinweise und Haltbarkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre</li><li>- Für den Einsatz im Gesundheitswesen</li><li>- Es wird empfohlen die Atemschutzmaske alle 4 Stunden oder bei Durchfeuchtung abzusetzen und zu wechseln</li><li>- Nicht wiederverwendbar</li></ul>
Lagerbedingungen	- Nicht unter 0°C oder über 40°C und an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern
Größe Maske	- 16x11cm in gefaltetem Zustand (Geringe Größenabweichungen möglich)
Gewicht (pro Maske)	- ca. 5,25 g (Geringe Größenabweichungen möglich)
Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none"><li>- CPA-FFP2</li><li>- OETI zertifiziert gemäß GZ 2020-0.247.451</li></ul>
Produktspezifikationen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwendung eines 5-lagigen Vlieses: 2 Außenlagen aus Spunbond Vlies, zwei Innenlagen aus Hot-Air-Cotton und eine Centerlage aus Melt-Blown Vlies (Polypropylen)</li><li>- 9 cm extra starker und flexibler Nasenbügel, bestehend aus 2 Metalldrähten mit Kunststoffummantelung</li></ul>

Bitte überprüfen Sie alle Ihnen angebotenen Zertifikate unter <https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe> auf ihre Echtheit. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.